



Intégration de Xpert® HIV-1 Viral Load et Xpert® HIV-1 Qual sur les systèmes GeneXpert® existants

Questions fréquentes

Q : Le test Xpert HIV-1 Viral Load est-il préqualifié par l'OMS ?

R : Oui.

Q : Le test Xpert HIV-1 Qual peut-il être utilisé pour le diagnostic précoce chez le nourrisson (Early Infant Diagnosis, EID) ?

R : Oui, le test Xpert HIV-1 Qual peut être utilisé pour l'EID et la détection d'une infection aiguë au VIH. Ce test est enregistré CE-IVD et préqualifié par l'OMS (PQ OMS) dans ce but.

Q : Existe-t-il des protocoles de vérification pour les tests Xpert HIV-1 Viral Load et Xpert HIV-1 Qual ?

R : Oui, ils ont été développés par les équipes applicatives terrain de Cepheid. Pour plus de détails, contactez le service d'assistance technique de Cepheid.

Q : Quels sont les types d'échantillon validés pour le test Xpert HIV-1 Qual ?

R : Les types d'échantillon approuvés pour le test Xpert HIV-1 Qual sont les gouttes de sang séché (GSS) et le sang total (ST).

Q : Quels sont les types d'échantillon validés pour le test Xpert HIV-1 Viral Load ?

R : Le seul type d'échantillon approuvé pour le test Xpert HIV-1 Viral Load est le plasma dérivé du sang total collecté dans des tubes de prélèvement EDTA, EDTA-PPT ou ACD.

Q : Les tests Xpert HIV-1 Viral Load et Xpert HIV-1 Qual peuvent-ils être réalisés sur les systèmes GeneXpert existants ?

R : Oui.

Q : Les systèmes GeneXpert existants ont-ils besoin d'une mise à jour matérielle avant que les tests Xpert HIV-1 Viral Load et Xpert HIV-1 Qual puissent être réalisés ?

R : Non, les systèmes GeneXpert existants n'ont pas besoin d'une mise à jour matérielle.

Q : Les systèmes GeneXpert existants ont-ils besoin d'une mise à jour logiciel avant que les tests Xpert HIV-1 Viral Load et Xpert HIV-1 Qual puissent être réalisés ?

R : Oui, les systèmes GeneXpert existants ont besoin de mises à jour logiciel à la version 4.7b ou ultérieure. Les fichiers de définition du test (ADF) Xpert HIV-1 Viral Load et Xpert HIV-1 Qual doivent être chargés avant utilisation.

Q : Combien coûtent les mises à jour logiciel et les ADF Xpert HIV-1 Viral Load et Xpert HIV-1 Qual ?

R : Les mises à jour logiciel et les ADF sont fournis gratuitement par Cepheid et par nos fournisseurs de services agréés (ASP).

Q : Sur un système GeneXpert à 2 modules ou plus, les tests Xpert HIV-1 Viral Load ou Xpert HIV-1 Qual peuvent-ils être réalisés en même temps qu'un test Xpert MTB/RIF ?

R : Oui, les tests Xpert HIV-1 Viral Load ou Xpert HIV-1 Qual peuvent être réalisés en même temps qu'un test Xpert MTB/RIF parce que le système GeneXpert est une véritable plate-forme ouverte et polyvalente avec des modules qui fonctionnent indépendamment.

Q : Les utilisateurs GeneXpert actuels ont-ils besoin d'une formation particulière pour traiter les tests Xpert HIV-1 Viral Load et Xpert HIV-1 Qual ?

R : Oui, les utilisateurs GeneXpert actuels doivent être formés afin d'assurer une préparation adéquate des échantillons, le traitement et l'interprétation/le compte-rendu correct des résultats. Cependant, cette formation est simple et peut être dispensée en ligne/à distance. Pour plus d'informations, veuillez contacter le représentant Cepheid le plus proche.

SIÈGE SOCIAL

904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 États-Unis

APPEL GRATUIT

(depuis les États-Unis) +1.888.336.2743
TÉLÉPHONE +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192


SIÈGE EUROPÉEN

Vira Soleih
81470 Maurens-Scopont, France

TÉLÉPHONE

+33.563.82.53.00
FAX +33.563.82.53.01
E-MAIL cepheid@cepheideurope.fr

www.Cepheidinternational.com

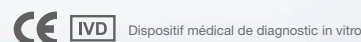

Peut ne pas être disponible dans tous les pays.

3096-02F